


endolite

управляй движением


Сборочные инструкции для съемного торсионного ротатора голени

409230


Данное устройство предназначено для голенных трубчатых систем диаметром 35 мм и трубчатых стяжных устройств. Устройство используется для поглощения торсионных нагрузок и ротационной юстировки.

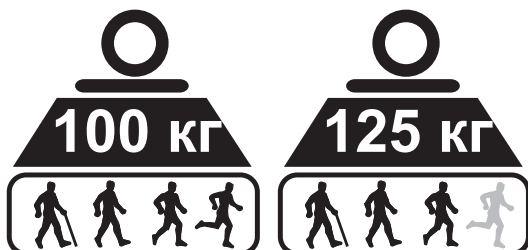

Установка съемного торсионного ротатора голени

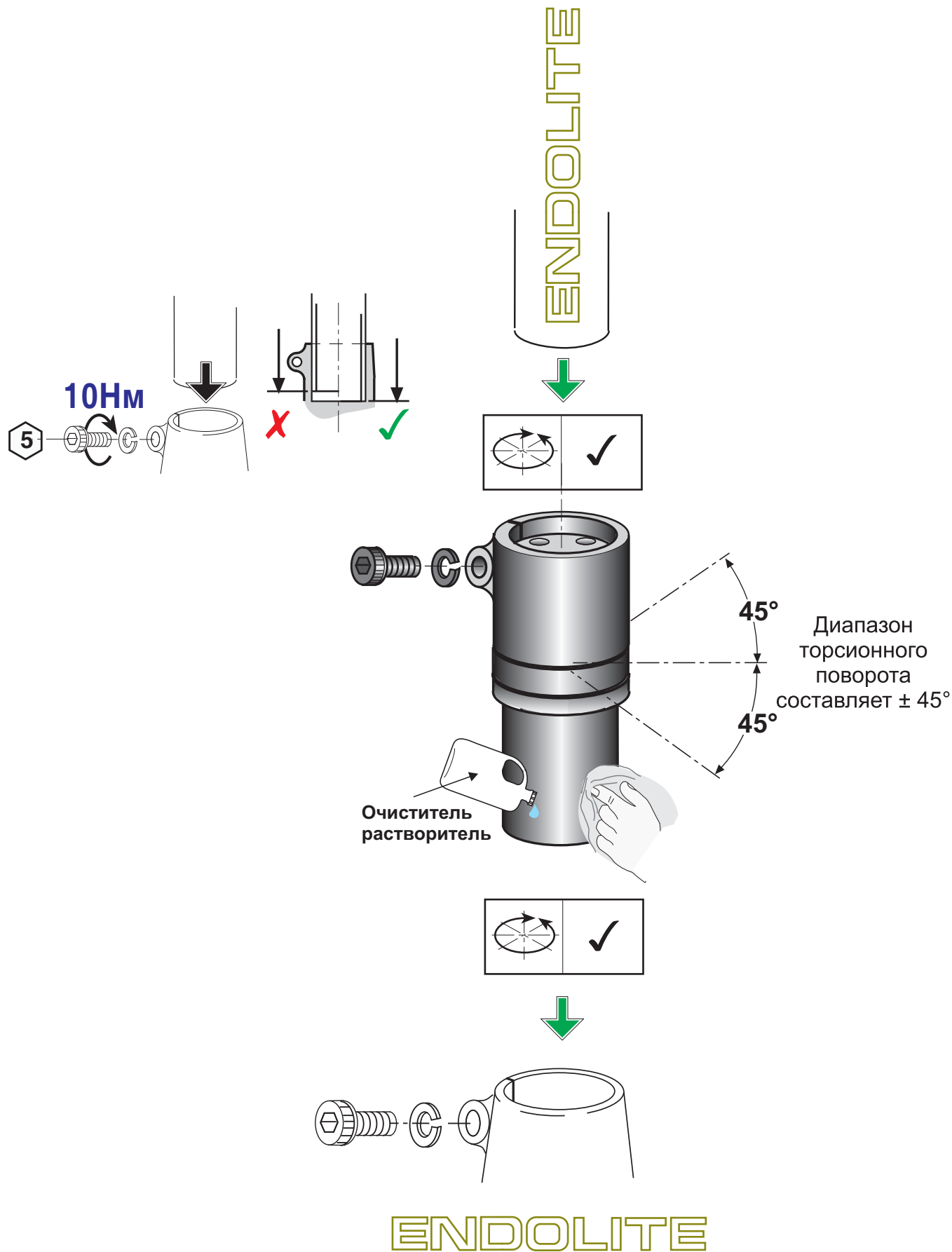

Разборка съемного торсионного ротатора голени

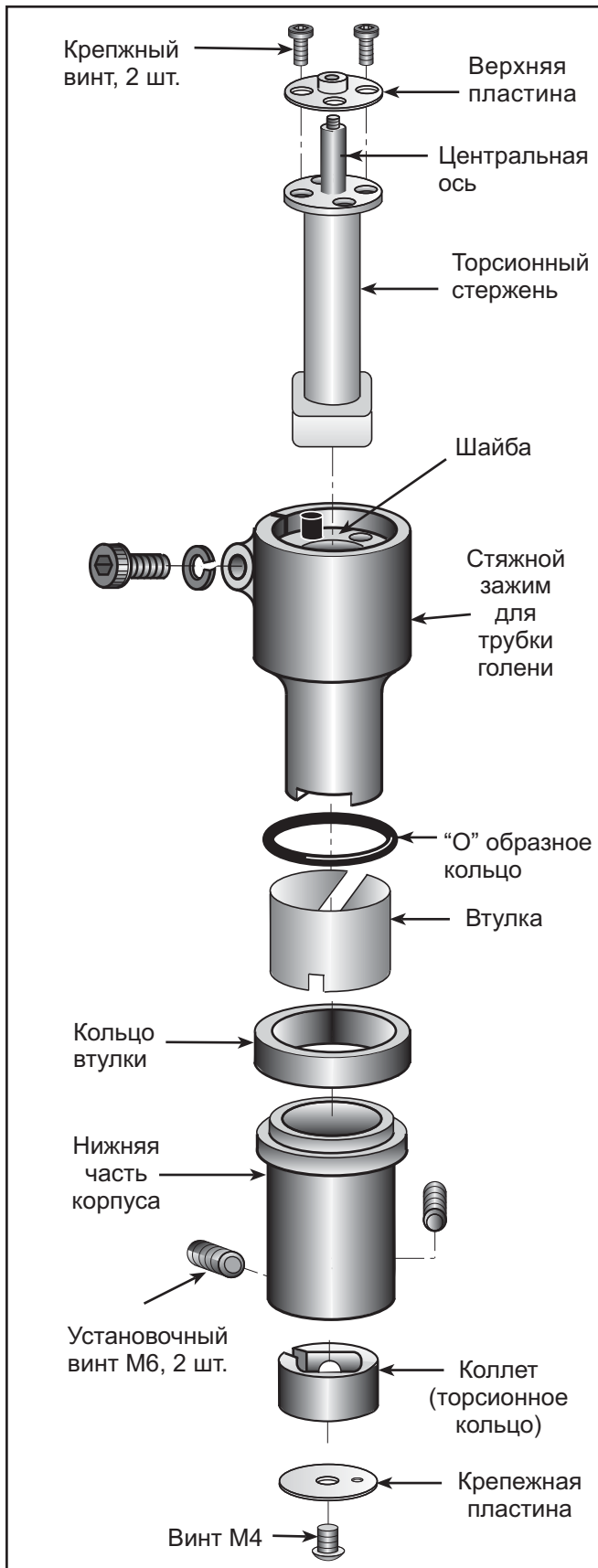

СТАДИЯ 1

Отвинтите винт М4 и извлеките крепжную пластину из сборки корпуса.

СТАДИЯ 2

Отвинтите два винта и извлеките сборку верхней пластины с центральной осью.

СТАДИЯ 3

Вывинтите 2 установочных винта М6 и извлеките стяжной зажим для трубки голени из нижней части корпуса.

СТАДИЯ 4

Теперь можно извлечь торсионный стержень и при необходимости заменить его (см. таблицу).

СТАДИЯ 5

Перед повторной сборкой слегка смажьте поверхность втулки и стяжного зажима для трубки голени сапфировой смазкой (шифр **928015**).

СТАДИЯ 6

Убедитесь в том, что кольцо втулки было надето на посадочное место нижней части корпуса, “О” образное кольцо расположено в его углублении, а вырез во втулке совмещен со стопорным штырем нижней части корпуса.

СТАДИЯ 7

Вставьте стягивающую трубку в сборку нижнего корпуса, убедитесь, что промежуток в дистальном конце стягивающей трубки совмещен со стопорным штырем нижнего корпуса.

СТАДИЯ 8

Задвиньте торсионный стержень через сборку и разместите его квадратный торец в колете.

СТАДИЯ 9

Замените сборку “центральная ось/верхняя пластина”. Используйте фиксатор “Локтайт 222” для всех винтов.

СТАДИЯ 10

Нанесите фиксатор “Локтайт-222” на резьбу установочных винтов М6 и затяните. Убедитесь в том, что модуль полностью утоплен в корпусе, то есть перед затяжкой винтов должен отсутствовать зазор между поверхностями кольца втулки, стяжного зажима для трубки голени и нижней части корпуса.

СТАДИЯ 11

Замените крепжную пластину и завинтите винты (применение резьбового фиксатора типа “Локтайт” не требуется).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОРСИОННЫЕ СТЕРЖНИ.

Шифр	Категория	Цвет
403009	0.5 Нм/град.	Красная
403010	0.6 Нм/град. (установлена)	Белая
403011	0.7 Нм/град.	Фиолетовая

938064/03-0309

Съемный торсионный ротатор голени

Установка косметических облицовок для съемного торсионного ротатора голени



БЕДРО

Следуйте стандартным процедурам при сборке мягкой облицовки бедра и облицовки щиколотки, смажьте внутреннюю область облицовки щиколотки техническим вазелином (**928001**). Наденьте финишное тканевое или усиленное силиконовое рукав-покрытие.

РАЗДЕЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВКИ

Отрежьте облицовку щиколотки как показано на рисунке, смажьте перед сборкой покрытия указанную область техническим вазелином.

ГОЛЕНЬ

Отрежьте облицовку щиколотки как показано на рисунке, смажьте перед сборкой покрытия указанную область техническим вазелином.

Как альтернативный вариант, можно использовать мягкую универсальную обезличенную облицовку под вычленение колена (**561022**). Обрежьте по требуемой длине и подгоните по требуемой форме для размещения внутри гильзы. Наденьте финишное тканевое покрытие.



endolite
управляй движением

эндолит россия

☎ +7 (495) 354 4003

📠 +7 (495) 354 3788



www.endolite.ru

www.blatchford.ru

938064/03-0309

Съемный торсионный ротатор голени