
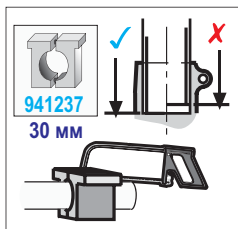


Пилон TT Pro с адаптером под пирамидку

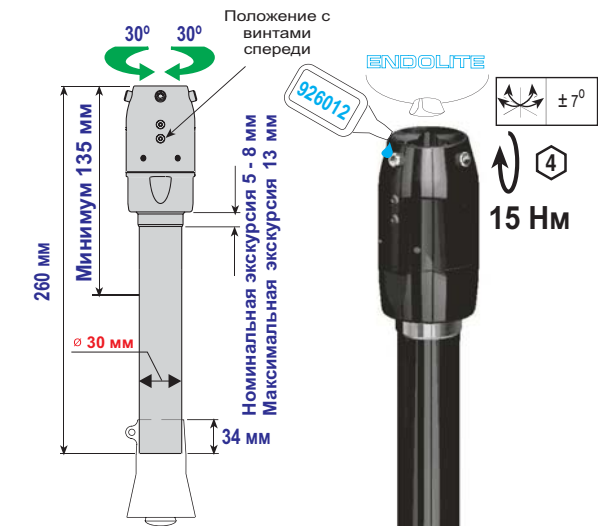








Торсионные стержни

- 1 = 1 метка-точка 406007
- 2 = 2 метки-точки 406008
- 3 = 3 метки-точки 406009


Пружины

- P = Пружина с фиолетовой меткой 405017
- W = Пружина с белой меткой 405023
- B = Пружина с черной меткой 405019

После установки торсионного стержня и пружины возьмите черный нестираемый маркер и обозначьте маркировку параметров пилона (Число и Букву), путем закрасивания неиспользуемых линий, выгравированных на корпусе пилона.

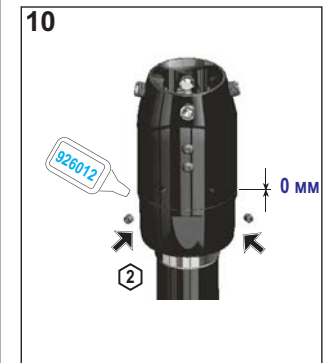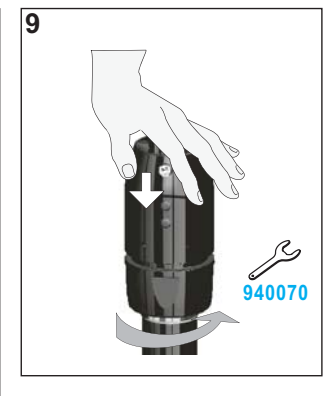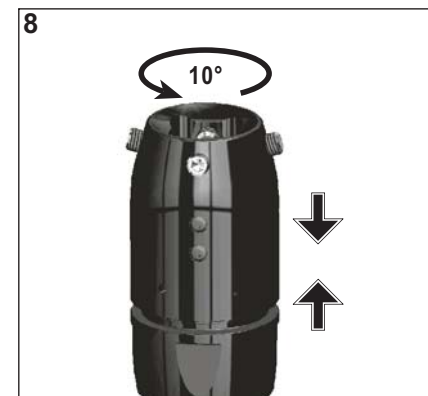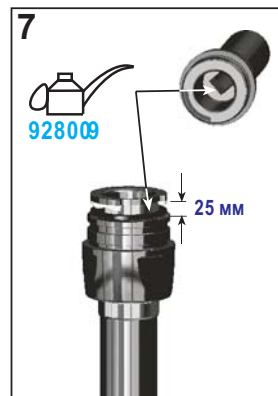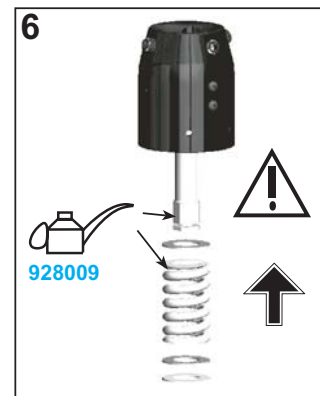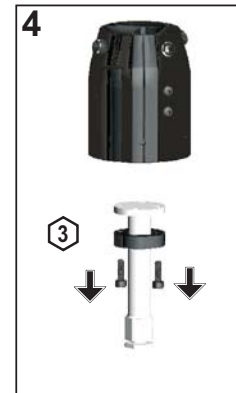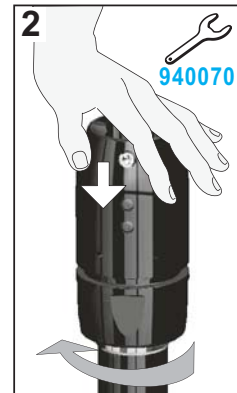

Замечание: Для достижения оптимальной функциональности и технологичности старайтесь удерживать сборку вертикально.

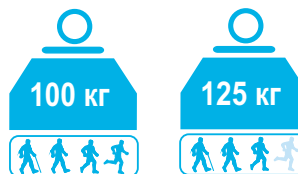

структурные ограничения



Выбор комплекта торсионных стержней и пружин

Небольшие недолгие прогулки по улице, с низкими скоростями ходьбы, преодоление небольших препятствий, прохождение по небольшим неровным поверхностям.


Повседневная активная ходьба, включая прогулки в быстром и переменном темпе, по различным поверхностям и ландшафтам, преодоление природных препятствий.

Ежедневные действия, имеющие значительно более высокий уровень, чем активная базовая ходьба : большие нагрузки, активные занятия легкой атлетикой, связанные со значительными нагрузками, активные детские игры и работа с тяжестями.

Вес инвалида (кг)	Стержень/ Пружина		
	Обычная ходьба	Активная ходьба	Бег, занятия спортом
44-52	1P	2P	3W
53-59	2P	2W	3W
60-68	2P	3W	3B
69-77	2W	3W	3B
78-88	2W	3B	3B
89-100	3B	3B	3B
101-116	3B	3B	—
117-125	3B	3B	—

уровень воздействия

низкий умеренный высокий



Торсионные стержни

- 1 = 1 метка-точка **406007**
- 2 = 2 метки-точки **406008**
- 3 = 3 метки-точки **406009**

Пружины

- P = Пружина с фиолетовой меткой **405017**
- W = Пружина с белой меткой **405023**
- B = Пружина с черной меткой **405019**



Vita Orta Co Ltd.

Представительство в России
ООО "Компания ВИТА-ОРТА"

109383, Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 31
 +7 (495) 354 - 40 - 03 +7 (495) 354 - 37 - 88
 www.blatchford.ru sales@blatchford.ru