



endolite
управляй движением

Описание:

SkinFX - это максимально приближенная к естественному виду косметическая силиконовая облицовка, предназначенная для инвалидов с ампутацией голени. Естественный вид, натуральные цветовые оттенки, эластичность, аналогичная эластичности естественной кожи человека - все это делает силиконовую косметическую кожу SkinFX весьма привлекательной для инвалидов с ампутацией голени с невысокой двигательной активностью.

Использование:

Опрыскайте **внешнюю поверхность силиконовой кожи SkinFX** водным раствором изопропилового спирта или теплой водой с добавлением жидкого мыла. Выверните силиконовую косметическую кожу SkinFX наизнанку и расположите напротив мыска протезной стопы, после чего аккуратно накатайте силиконовую кожу SkinFX поверх стопы. Убедитесь в отсутствии складок, морщин или защемлений силиконовой кожи. Далее накатывайте силиконовую косметическую кожу SkinFX поверх протеза. Выполняйте эту операцию очень осторожно, не допуская разрывов и защемлений. Операцию накатывания следует выполнять очень осторожно, при помощи ладони (не рекомендуется разлаживать силиконовую кожу SkinFX пальцами), при необходимости используйте медицинский тальк. Кроме того, следует следить за тем, чтобы используемая Вами обувь надевалась на протезную стопу с установленной силиконовой кожей SkinFX легко, без заминов, задиров и защемлений. Слишком тесная обувь может вызвать разрушение силиконовой кожи SkinFX и утрате гарантии. При использовании обувного рожка, для снижения трения, следует слегка присыпать область сопряжения рожка и силиконовой кожи SkinFX медицинским тальком.

Силиконовая косметическая кожа SkinFX может носиться поверх протеза голени с облицовкой из твердого вспененного полимера или использоваться совместно с отдельными протезными косметическими облицовками. В этих случаях следует тщательно обработать и скруглить края гильзы, во избежание разрушения силиконовой косметической кожи. Обычно не требуется прикреплять силиконовую кожу к гильзе протеза, поскольку силикон имеет достаточно высокий коэффициент трения, предотвращающий сползание силиконовой кожи. Впрочем допустимо и приклеивание силиконовой косметической кожи к гильзе протеза.

При необходимости обрезки силиконовой косметической кожи следует пользоваться только специальными оберзными роликовыми устройствами, которые гарантируют обрезку за один проход, и оставляют круглые края. Применение иных устройств (в том числе обычных ножниц и ножей) недопустимо, поскольку в этом случае на краях остаются микроразрывы, ведущие к разрушению силиконовой кожи.

Если края протезной гильзы слишком тонкие, следует обрезать силиконовую косметическую кожу заподлицо с гильзой и прикрепить при помощи специальной ленты (шифр: 579821). Для постоянного неразъемного крепления обработайте гильзу при помощи специальной грунтовки Loctite 770 Primer (шифр: 926108), после высыхания грунтовки нанесите на гильзу клей Loctite 406 (шифр: 926107) и подклейте силиконовую кожу к гильзе протеза. Однако помните, что все попытки снять силиконовую кожу после подклейки к гильзе протеза неизбежно приведут к ее разрушению.

Силиконовая косметическая кожа может использоваться в протезных системах, оснащенных торсионными ротаторами, пилонами с амортизацией пяточного удара, а также в протезных системах с регулировкой щиколотки. Однако для регулировки и юстировки этих устройств может потребоваться снятие силиконовой кожи. Ни в коем случае не делайте оверстий в силиконовой коже, для доступа к элементам регулировки, а все отверстия на протезе, должны быть заглушены пробками из вспененного полимера, с целью предотвращения защемления силиконовой косметической кожи.

Рекомендации по установке:

Надевание косметического чулка поверх протеза и подклеивание его к гильзе протеза перед накатыванием силиконовой косметической кожи позволит сгладить различие в цветах косметических облицовок и компонентов протеза. Слегка присыпьте тальком области, где косметический чулок надевается поверх гильзы, если этого не сделать, то в этом месте будут возникать усилия трения и чулок со временем может разорваться. Подбором цветового тона чулка (темный тон, светлый тон) можно скорректировать общий цветовой тон протезной системы.

Меры предосторожности:

- При использовании Силиконовой Кожи SkinFх недопустимо ходить "босиком";
- Запрещено использовать Силиконовую Кожу SkinFх, если на ней появились микротрещины, разрывы или какие-либо другие механические повреждения;
- Силиконовая Кожа SkinFх не предназначена для использования в водонепроницаемых протезах, поскольку силиконовые материалы во влажной среде становятся очень скользкими. Кроме того, Силиконовая Кожа SkinFх не обеспечивает герметичности, и вода легко может попасть в механизм протеза и вызвать серьезные разрушения.

Уход за силиконовой кожей SkinFх

- Силиконовая Кожа SkinFх, должна ежедневно промываться теплой водой с мягким моющим средством. Промывка производится аналогично промывке силиконовых гелевых чехлов. Для удаления сильных загрязнений вокруг области стопы допускается в небольших количествах применять разбавленный медицинский спирт или моющие жидкие средства, после чистки необходимо сразу же промыть место чистки теплой проточной водой.
- Силиконовая Кожа SkinFх полностью соответствует стандартам на биологическую совместимость Международной Организации по Стандартизации (ISO). Однако, если у Вас возникла аллергическая реакция, то необходимо прекратить использование Силиконовой Кожи SkinFх и обратиться к лечащему врачу.


Выбор Силиконовой Кожи SkinFх

Силиконовая Кожа SkinFх выпускается различных размеров и различных цветовых оттенков, начиная с очень светлых тонов и заканчивая темными. Для подбора требуемой Силиконовой Кожи SkinFх по цвету можно воспользоваться **Селектором Подбора Цвета** (шифр: 579921), а также следует правильно подобрать размер стопы.

Пожалуйста выберите необходимое изделие пользуясь таблицами приведенными ниже.

Размеры

Минимальный измеренный размер	Маленькая (стопы 22 - 24)	Средняя (стопы 25 - 26)	Большая (стопы 27 - 30)
A	430 мм	430 мм	465 мм
B	200 мм	210 мм	220 мм
C	300 мм	320 мм	340 мм

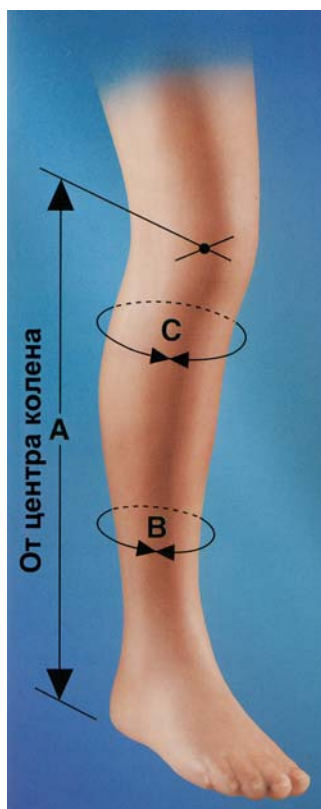

Левое исполнение Светлые тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
L1	572101	572105	572109
L2	572102	572106	572110
L3	572103	572107	572111
L4	572104	572108	572112

Левое исполнение Средние тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
M1	572133	572137	572141
M2	572134	572138	572142

Левое исполнение Темные тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
D1	572165	572169	572173
D2	572166	572170	572174

Правое исполнение Светлые тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
L1	572117	572121	572125
L2	572118	572122	572126
L3	572119	572123	572127
L4	572120	572124	572128

Правое исполнение Средние тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
M1	572149	572153	572157
M2	572150	572154	572158

Правое исполнение Темные тона

Цвет	Размер стопы		
	22 - 24	25 - 26	27 - 30
D1	572181	572185	572189
D2	572182	572186	572190