


ENDOLITE

Стопа Мультифлекс специальная серия размеры 25 - 28 см


519525 - 519532

Приклеить с помощью клея Эвостик 528 (шифр: 926213) или его эквивалента***

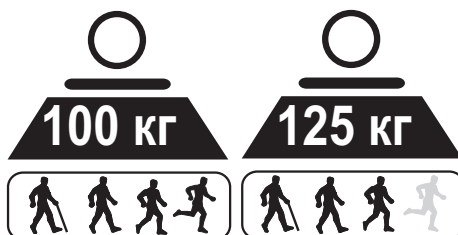

*** Перед приклеиванием следует слегка зашкурить поверхность склейки, затем тщательно очистить и обезжирить поверхность при помощи соответствующего растворителя.

Высота каблука регулируется при помощи зубчатой интерфейсной пластины 15 мм от номинала, в трех положениях. Каждое положение дает изменение высоты в 5 мм.

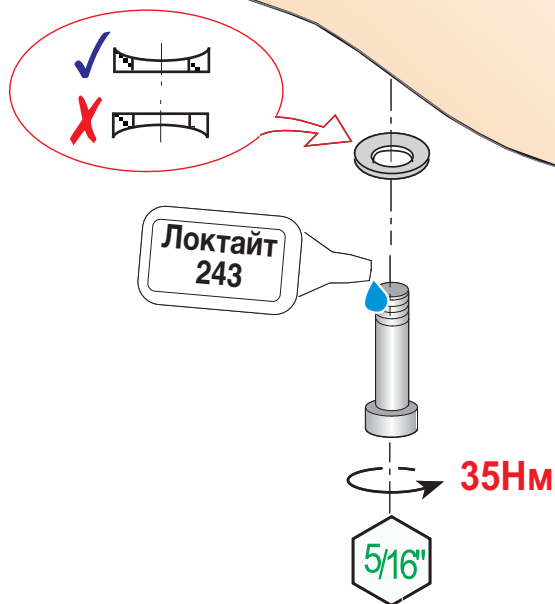


ВНИМАНИЕ:

Болт стопы следует затягивать с усилием в 35 Нм. При затяжке более 35 Нм может произойти разрушение данного болта в процессе эксплуатации.


При затяжке рекомендуется использовать динамометрический ключ с набором адаптеров (шифр 940057).

Размер A

25см }
26см } 75мм
27см }
28см } 80мм

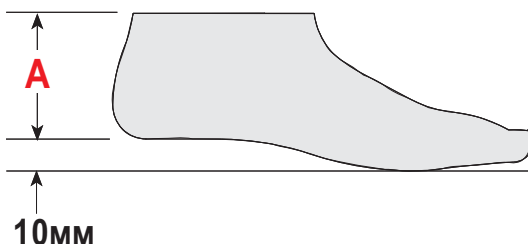


Техническое руководство по сборке стандартной щиколотки Мультифлекс

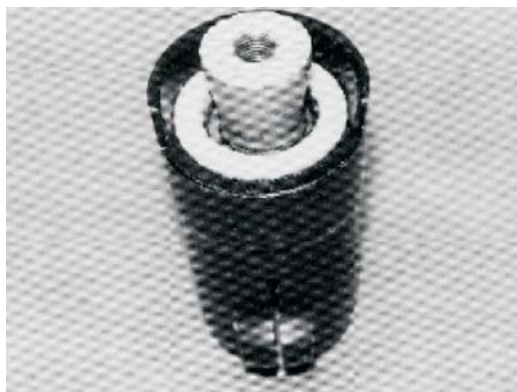


СТАДИЯ 1

Острым ножом подрезать бумажную защитную прокладку с фетровой шайбы. Удалить бумажную прокладку с фетровой шайбы освободив клеевой слой. Установить фетровую прокладку клеевым слоем к амортизатору к верхней части корпуса цилиндра.

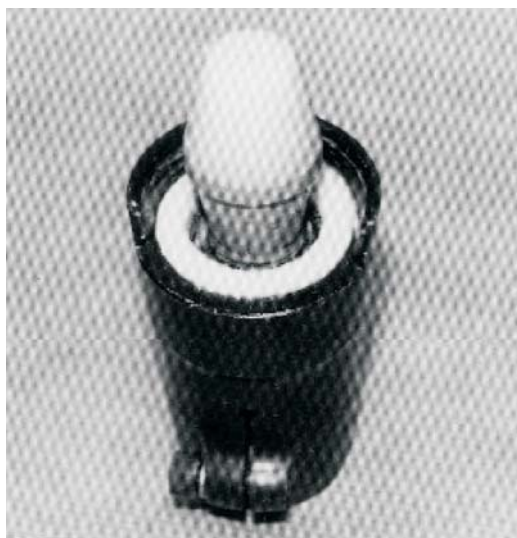

СТАДИЯ 2

Разместить ключ для установки амортизатора Мультифлекс щиколотки (заказывается отдельно, шифр 941127) по верх интересной пластины с зубцами.

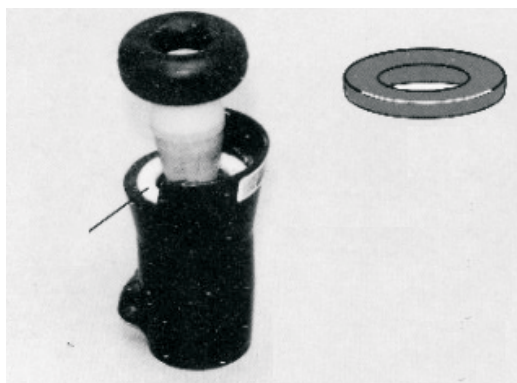

СТАДИЯ 3

Слегка смажьте поверхность амортизатора техническим вазелином по верх внутреннего отверстия. Убедитесь в том, что цветовая маркировка амортизатора просматривается в пазе корпуса щиколотки. С усилием по направляющей ключа установить амортизатор в корпус щиколотки. Удалить ключ с амортизатора. Установить пластиковую шайбу поддержки амортизатора выпуклой поверхностью наружу.



Затяжка только динамометрическим ключом с усилием 35 Нм !

СТАДИЯ 4

Соберите стандартную Мультифлекс щиколотку со стопой Мультифлекс. Правильно расположите интерфейсную пластину с зубцами (**зубцы должны полностью совпасть !**). Высота каблука может быть отрегулирована при помощи интерфейсной пластины с зубцами.

Замечание: Вогнутая поверхность шайбы стопы обязательно должна примыкать к стопе !

Нанесите 2-3 капли фиксатора ЛОКТАЙТ 242 на резьбу болта стопы и **ЗАТЯНИТЕ С УСИЛИЕМ В 35 НМ. При затяжке с усилием более 35 Нм болт стопы в процессе эксплуатации протеза может разрушиться !**

519525 - 519532

**Стопа Мультифлекс
Специальная Серия**

**(высота подъема
каблука 10 мм)**

Размер	Левая	Правая
25 см	519525	519526
26 см	519527	519528
27 см	519529	519530
28 см	519531	519532

ВНИМАНИЕ:

- 1) При сборке Мультифлекс щиколотки со стопой Мультифлекс следует правильно располагать интерфейсную пластину с зубцами (зубцы при этом должны полностью совпадать).
- 2) Вогнутая поверхность шайбы стопы обязательно должна примыкать к стопе !
- 3) Болт стопы рекомендуется затягивать динамометрическим ключом (шифр: 940057) с усилием в 35 Нм. При затяжке с усилием более 35 Нм болт стопы в процессе эксплуатации протеза может разрушиться !



endolite
управляй движением

эндолайт россия

