

ENDOLITE

Регулируемая Стопа размеры с 22 по 25 см

(Patient Adjustable Foot)

509127 – 509134



Предельно допустимый вес пациента 80 кг, при нормальном темпе ходьбы. Рекомендуется использовать совместно с щиколотками Мультифлекс, имеющими зубчатый интерфейс для регулировки высоты каблука.

Размер	Левое исполнение	Правое исполнение
22 см	509127	509128
23 см	509129	509130
24 см	509131	509132
25 см	509133	509134



эндолайт россия

☎ +7 (495) 354 4003

☎ +7 (495) 354 3788

🌐 www.endolite.ru
🌐 www.blatchford.ru



ENDOLITE

Высота каблука регулируется при помощи зубчатого интерфейса стопы/щиколотки ± 15 мм от номинала в 3 положения, каждое положение дает изменение высоты примерно в 5 мм

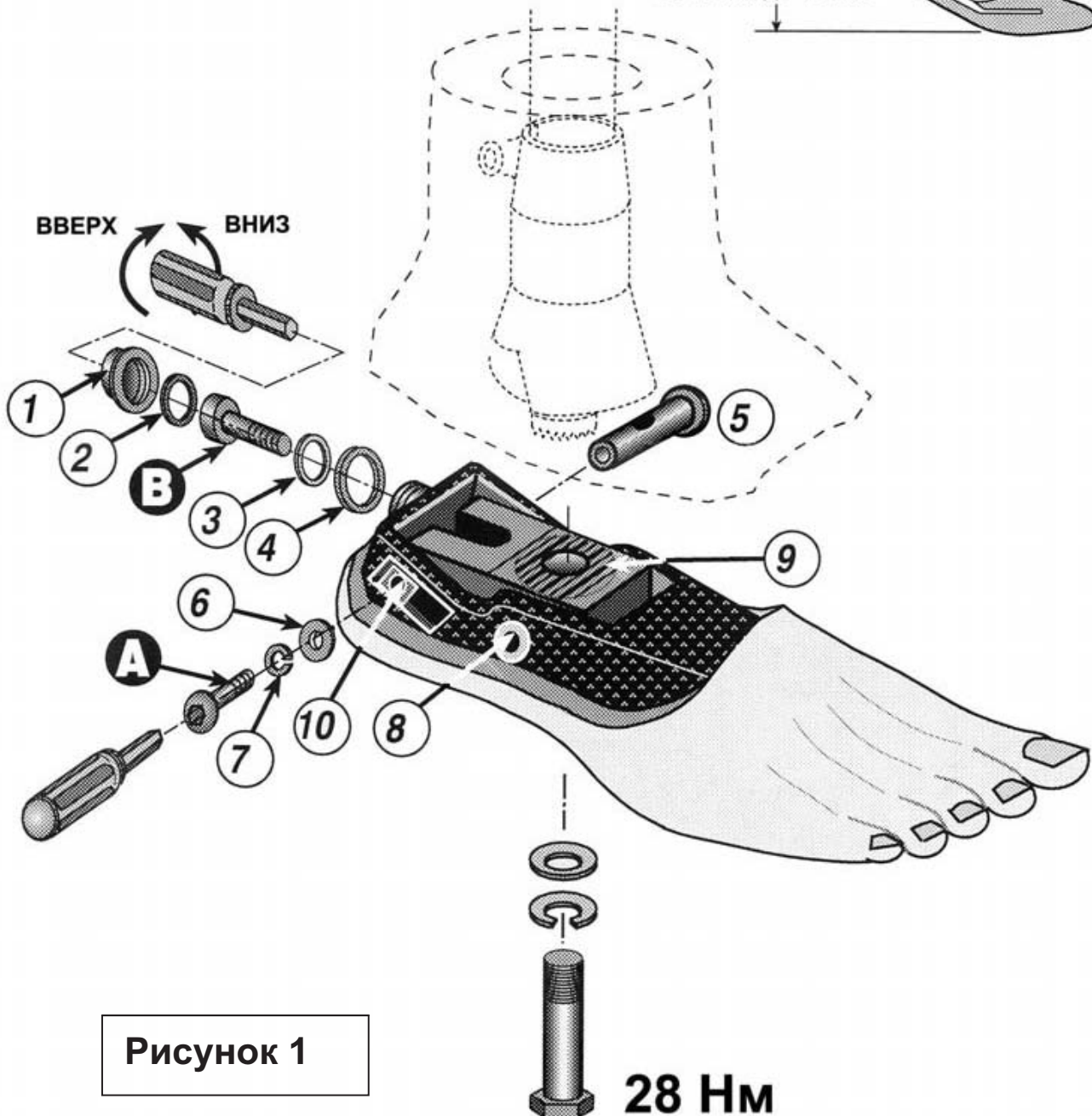
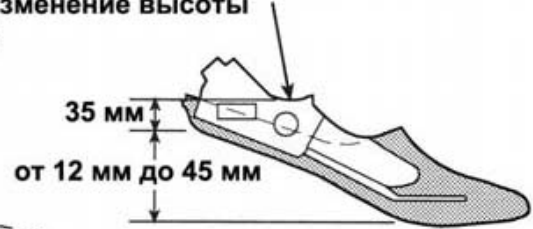


Рисунок 1

ENDOLITE

Юстировка

- 1.) Ослабьте стяжной блокировочный винт “А” (см. рис. 1)
- 2.) Используя юстировочный ключ (**940052**) вращайте юстировочный винт “В” по часовой стрелке для уменьшения подъема каблука, или против часовой для увеличения подъема каблука.
- 3.) Протезист должен предупредить пациента, что протез после юстировки высоты каблука должен находиться в перпендикулярном положении.
- 4.) Затяните стяжной блокировочный винт “А”.

ЗАМЕЧАНИЯ

- 1.) Не рекомендуется вращать винт “В” при затянутом винте “А”!
- 2.) Излишнее усилие при затягивании может привести к повреждениям юстировочного механизма!

Сборка

- 1.) Юстировочный механизм должен позволять производить доступ к болту стопы и подсоединение стопы к щиколотке, для этого используйте стяжной блокирующий винт “А” находящийся на боковой стороне стопы.
- 2.) Установите стопу в нижнее положение (высота каблука 12 мм), после этого следует измерить длину протеза.
- 3.) Удалите стопу, отсоедините отделку щиколотки в месте ее соединения со стопой, отформуйте отделку.
- 4.) Вырежьте отверстие в отделке на линии стяжного блокировочного винта “А”, и юстировочного винта “В”, используя 3 мм (1/8 дюйма) выколотку (шифр **940401**).
- 5.) Замените стопу, и установите правильно интерфейсную пластину с зазубринами (**зазубрины должны полностью совпасть**). Затяните стопу с усилием **28 Нм**.
- 6.) Вырежьте небольшое отверстие во внутреннем чулке для юстировки через отверстие в отделке.
- 7.) Необходимо периодически проверять затяжение болта стопы.

Обслуживание регулируемой стопы

Используйте сервисный набор 509927

В нормальных условиях регулируемая стопа не требует никакого специального обслуживания. Однако может возникнуть необходимость в замене некоторых деталей. Эти детали входят в сервисный набор (**509927**). Замену следует производить после длительного срока эксплуатации в режиме больших нагрузок на стопу.

Замена прокладок (упорных шайб) и юстировочного винта.

- 1.) Отсоедините стопу от протеза и отделки щиколотки.
- 2.) Отверните предохранительный колпачок (1) и удалите бронзовую прокладку (упорную шайбу) (2).
- 3.) Удалите юстировочный винт “В”, нейлоновую прокладку (упорную шайбу) (3) и прокладку предохранительного колпачка (4).
- 4.) Удалите юстировочную ось (5)
 - a.) Если в конструкции используется простая ось старых модификаций, то ее следует просто вытолкнуть из стопы наружу.
 - b.) Если в конструкции используется ось последних разработок со шляпкой, то для ее извлечения требуется удалить стяжной блокировочный винт “А” и извлечь юстировочную ось (5), прокладку (6) и гроверную шайбу (7).
- 5.) Вытолкните наружу центральную ось шасси (8), извлеките блок шасси (9) из пяточной сборки и удалите два внешних направляющих блока (10).
- 6.) Соберите в обратном порядке используя запасные части из сервисного набора. Используйте стяжной блокирующий винт “А” находящийся на боковой стороне стопы.
- 7.) Нанесите очень небольшое количество смазки СТП (СТР, шифр **928105**) на юстировочную ось (5) и резьбу. **НЕ СМАЗЫВАЙТЕ** предохранительный колпачок, прокладки и т. п.
- 8.) Нанесите одну каплю фиксатора “Локтайт 243” на резьбу предохранительного колпачка (1) непосредственно перед повторной сборкой.
- 9.) Произведите сборку согласно описанию в разделе “Сборка”

ENDOLITE

ХРАНЕНИЕ	Изделие не требует какого-либо специального хранения или ухода
СБОРКА	Все происходящие в процессе носки изменения должны обязательно сообщаться протезисту или сборщику. При необходимости изделие может быть разобрано, очищено от загрязнителей, и снова собрано по приведенной выше схеме.
ГАРАНТИЯ	На изделие налагаются обычные гарантийные обязательства



endolite
управляй движением

эндолайт россия

☎ +7 (495) 354 4003

📠 +7 (495) 354 3788



www.endolite.ru



www.blatchford.ru